

新型コロナウイルス抗原検査キットの使い方

【内容物】



新型コロナウイルス検査カード


検体希釈液

咽頭スワブ

※上記はサンプル画像であり、実際に流通している抗原検査キットとは外観が若干異なる場合があります。

新型コロナウイルス検査カードは銀の袋の中に入っています。

【新型コロナウイルス検査カードについて】

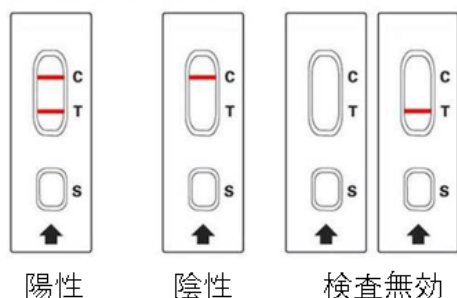

サンプル投入口（Sの丸い部分）に検体希釈液を投入します。

【検査手順】


1. 咽頭スワブの先端を喉の奥の方に入れ、数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。※唾液だと検査結果が表れないのでNGです。

2. 検体を採取した咽頭スワブの綿球部分を速やかに検体希釈液に浸します。検体希釈液と粘膜がまざるようにかき混ぜます。

3. 検査カードを銀の袋から取り出し机の上に水平に置き、サンプル投入口に検体希釈液を移します。咽頭スワブを使って、ゆっくり、少しずつ丁寧に移すイメージです。**まずは8～10滴ゆっくり垂らし様子を見ます。焦って大量の液を垂らさないようにしてください。**

約5分後、判定部分にラインが浮かび上がってきます。

補足：検査結果が見にくい場合は、凝視するか、携帯電話で青い光を映して、ライト代わりに照らしてください。<http://covid19jp.com/blue.jpg> にアクセスすれば青い画面が表示できます。

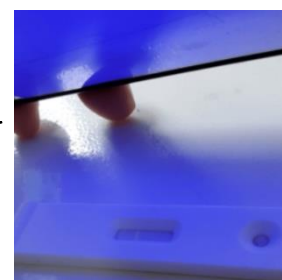

以上